

# TRASFORMER®

L'originale dal 2001

## ISTRUZIONI D'USO

### PISTOLA EASY FLOW - cod. 2.000.019




Grazie a due porta cartucce e 4 diversi pistoni intercambiabili, la pistola universale consente di utilizzare cartucce da 25ml e 50ml nei rapporti 1:1, 2:1, 4:1, le siringhe Comp Flow da 3 gr. utilizzando l'adattatore per composito e le siringhe Comp Flow da 20gr attraverso l'apposito pistone modificato (nr. 10). Contiene inoltre una siringa trasparente modificata per l'iniezione della resina (vedi pag.2)





**NOTA:** Per utilizzare il composito Comp Flow da 20 gr è necessario apportare delle modifiche alle siringhe, illustrate in queste istruzioni, ed utilizzare il pistone appositamente modificato.






#### INSERIMENTO E RIMOZIONE DEL PISTONE

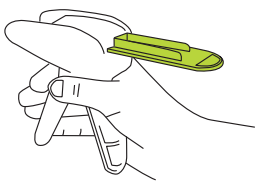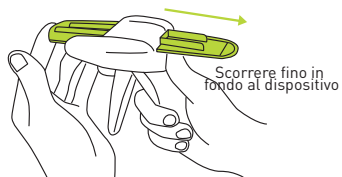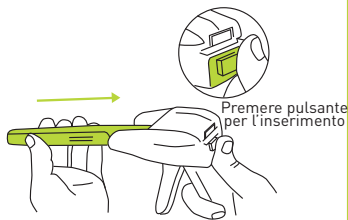


#### SOSTITUZIONE DEL PORTA CARTUCCIA

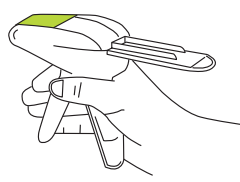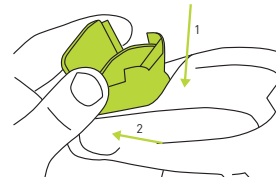


#### INSERIMENTO DELLA CARTUCCIA

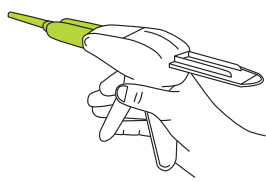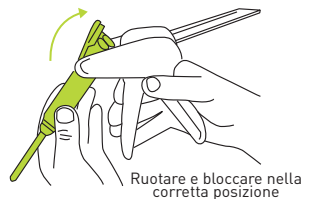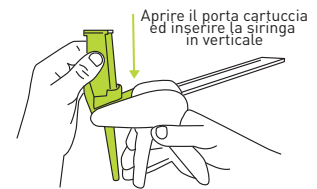

#### PER UTILIZZARE LE SIRINGHE COMP FLOW DA 3 GR


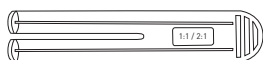


1 Inserire il pistone con rapporto 1:1 / 2:1

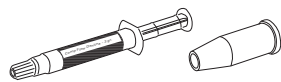

Siringa da 3gr.

Adattatore per composito (non incluso nel kit - cod. 2.000.018)

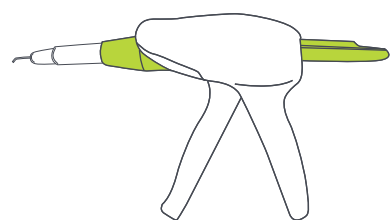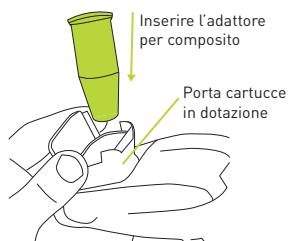

Trasformer e Fast Protec sono marchi di PPM srl


IU DISPENSER EASY FLOW  
REV 01 / 06.2018

📍 Via Colloredo, 80  
33010 Pagnacco (UD) - Italy


📞 T. +39 0432 650047  
info@trasformersystem.com  
www.trasformersystem.com

# TRASFORMER®


L'originale dal 2001

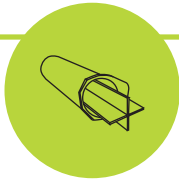

## MODIFICHE ALLA SIRINGA COMP FLOW DA 20 GR.

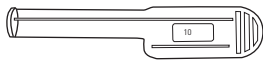


1 Utilizzare il pistone nr.10 appositamente modificato per le siringhe Comp Flow

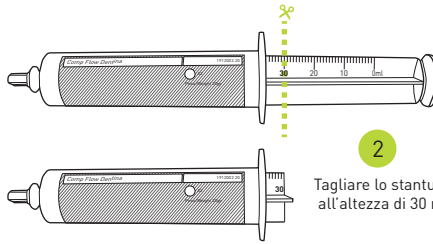

2

Tagliare lo stantuffo all'altezza di 30 ml

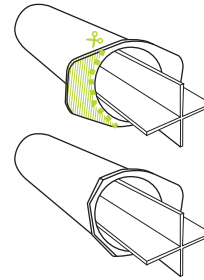


3

Tagliare **una** aletta della siringa come indicato in figura




## TECNICA DI INIEZIONE DELLA RESINA MEDIANTE PISTOLA DISPENSER EASY FLOW

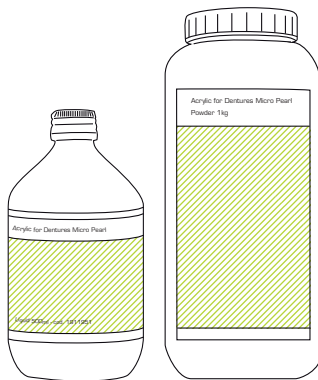


RESINA PER PROTESI  
ACRYLIC FOR DENTURES  
MICROPEARL

LIQUID 500ML  
POLVERE 1KG

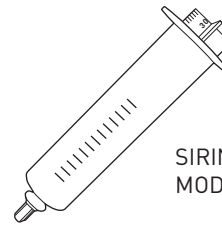


SIRINGA TRASPARENTE  
MODIFICATA

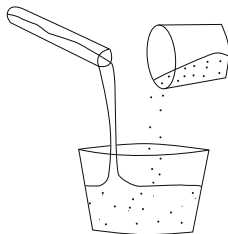

Dosare liquido  
e polvere






Mescolare fino ad ottenere  
un composto omogeneo

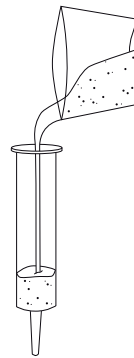

Versare nell'apposita  
siringa modificata

Con il Dispenser universale Easy Flow e le nuove siringhe, potrai facilmente iniettare la resina per protesi Acrylic for Dentures Micro Pearl, utilizzando la muffola Alu Big.

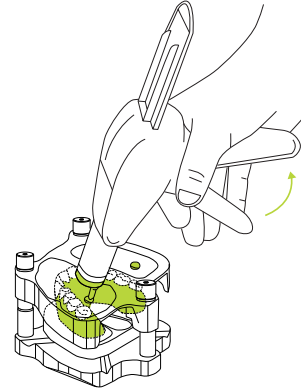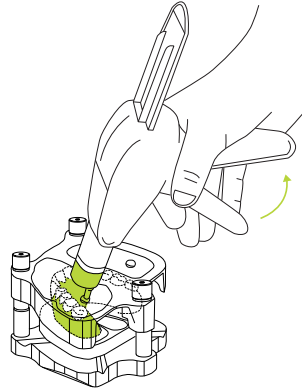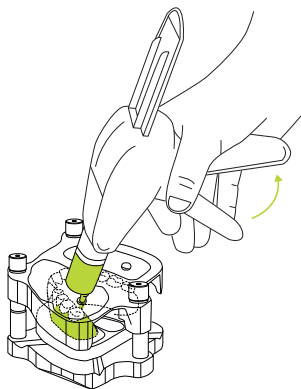

Trasformer e Fast Protec sono marchi di PPM srl

IU DISPENSER EASY FLOW  
REV 01 / 06.2018

📍 Via Colloredo, 80  
33010 Pagnacco (UD) - Italy

📞 T. +39 0432 650047  
📧 info@trasformersystem.com  
🌐 www.trasformersystem.com