

## **ISTRUZIONI D'USO**

### **MASTER ISO** codice 1911990

**CONFEZIONE:** Spray da 200 ml

#### **CARATTERISTICHE E INDICAZIONI**

Master Iso è uno spray isolante universale a base di cera indicato per isolare le resine poliuretaniche dai polieteri.

- Facile da applicare con il pratico spray
- Non lascia residui
- Non crea spessore
- Valido isolante, gesso - gesso su superfici estese

#### **UTILIZZO**

Pulire e asciugare le superfici da isolare; agitare bene la bomboletta prima dell'utilizzo e spruzzare da una distanza di circa 20 cm.

**Attenzione: se il prodotto è utilizzato per isolare materiali d'impronta da resine poliuretaniche o epossidiche, dopo aver spruzzato una prima volta, scuotere l'impronta per eliminare gli eccessi, lasciare asciugare l'impronta per circa 1 minuto e ripetere l'operazione. Non asciugare con getti d'aria compressa!**

#### **AVVERTENZE**

Prodotto destinato esclusivamente all'uso professionale odontotecnico: seguire attentamente le istruzioni d'uso e le indicazioni riportate in etichetta. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o su un corpo incandescente. Durante l'utilizzo indossare guanti e mascherina protettiva. Conservare fuori dalla portata dei bambini.