

## ISTRUZIONI D'USO EASY BAR

### » EASY BAR

Easy Bar - codice 300.00  
Confezione:  
1 valigetta con 245 barrette (5 pz x misura)  
1 calibro  
1 pinzetta  
1 plastica rigida con dimensioni delle barre

### APPLICAZIONI

Sistema di barrette preformate in supporto alla progettazione delle strutture per protesi implantari come protesi totale, fissa e avvitata.

### INDICAZIONI

Permette di tracciare in maniera precisa e veloce l'andamento della barra da realizzare tramite fusione.

### I VANTAGGI

- Si adatta facilmente alle varie conformazioni della bocca e alle diverse posizioni degli impianti.
- Possibilità di fissaggio con laser o cemento;
- Massima rapidità di progettazione ed esecuzione.

### ISTRUZIONI

- Colato il modello master e messo in articolazione procedere alla costruzione della parte gengivale;
- Avvitare i monconi sulle fixture e con il calibro in dotazione, inserendo le punte agli imbocchi del moncone, rilevare l'interasse degli stessi.
- Scegliere la barretta corrispondente e inserirla sui monconi. Eventualmente, in base alla necessità, è possibile piegare le barre con le apposite pinze, in modo da ottenere la curvatura desiderata.
- Proseguire con la progettazione integrando con la pattern resin e mettere in fusione come di consueto.

### Importante:

P.P.M. srl garantisce che i suoi prodotti rispettano le specifiche di vendita

Le informazioni contenute in queste istruzioni d'uso, sono basate sullo stato attuale nelle nostre conoscenze. Non potendo conoscere tutte le applicazioni per le quali possono essere utilizzati i nostri prodotti e le condizioni del loro impiego, non assumiamo alcuna responsabilità per un utilizzo diverso da quello indicato.

Leggere sempre attentamente le Istruzioni d'Uso prima di usare il prodotto.

Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche e migliorie al prodotto e al suo confezionamento.

